



Skannerin synkronointi tarkoittaa, että

SKANNERILLA TEHTYJEN SKANNAUSTEN TIEDOT LÄHETETÄÄN
MAAILMANLAAJUISELLE NU SKIN -PALVELIMELLE.

HYÖDYT:

- ✓ Näet skanneriraporteistasi yleiskatsauksen kaikesta skanneritoiminnastasi.
- ✓ Synkronointi muodostaa yhteyden ADR-tilauksiin liitettyjen skannausten välille.
- ✓ Nu Skin voi maksaa sinulle skanneribonuksesi.



S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Synkronoi skannerisi sovellusversion 2.0 kanssa

- ✓ jokaisen skannaussession jälkeen,
- ✓ ainakin kerran 14 päivän sisällä ja
- ✓ viimeistään kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Jos skanneriasi ei ole synkronoitu 14 päivän kuluessa, se poistetaan automaattisesti käytöstä. Voit tehdä uuden skannauksen vasta uuden synkronoinnin jälkeen.

”Tiedot”-välilehdeltä näet, kuinka monta päivää sinulla on aikaa jäljellä ennen seuraavaa synkronointia:



	
RECORDS	
RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Synkronoi skannerisi sovellusversion 2.0 kanssa

Skanneri synkronoidaan automaattisesti, kun iPadisi* on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.

- Kaikkien **synkronoitujen** skannausten kohdalla näkyy:

RECORDED

- Kaikkien **synkronoimattomien** skannausten kohdalla näkyy:

PENDING

- Synkronoi skannaukset painamalla painiketta:





Synkronoi skannerisi sovellusversion 3.0 kanssa

Skannauksesi synkronoidaan automaattisesti, kunhan laitteesi* on yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon.

Jos skannauksiasi ei ole synkronoitu, yhdistä vain laitteesi uudelleen Wi-Fi-verkkoon viimeistään kuukauden viimeisenä arkipäivänä, niin kaikki skannaukset synkronoidaan automaattisesti.

**S3-skannerisovelluksen versio 3.0 on kehitetty OS 12 - käyttöjärjestelmälle ja uudemmille käytettäväksi iPhonessa ja iPadissa.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

